

Lesen Sie folgende Packungsbeilage aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen für den Anwender.

Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss es jedoch gemäß den beschriebenen Angaben angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage gut auf, damit Sie sie im Bedarfsfall nochmals lesen können.
- Fragen Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Bei länger anhaltenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Vulniphan®

HYALURONSÄURE NATRIUMSALZ 5 mg
Vaginalovula

ZUSAMMENSETZUNG

Hyaluronsäure Natriumsalz, Centella asiatica, Calendula, Aloe Vera, Melaleuca, halbsynthetische Glyceride, BHT.

DARREICHUNGSFORM

Vulniphan ist ein Ovulum zur vaginalen Anwendung. Die Packung enthält 10 Vaginalovula zu je 2 g.

WAS VULNIPHAN IST UND WOFÜR ES ANGEWENDET WIRD

Die Wirkung von VULNIPHAN Vaginalovula beruht auf dem Vorliegen von Hyaluronsäure, einem Mucopolysaccharid, das in vielen Körpergeweben vorkommt. Die Hyaluronsäure wirkt als strukturelle Stütze, ernährt das Gewebe und verleiht ihm Festigkeit und Elastizität. Die Fähigkeit der Hyaluronsäure, den Prozess der Epithelerneuerung und Reparatur des Gewebes zu beschleunigen und zu verbessern, wurde in zahlreichen klinischen Studien nachgewiesen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Behandlung zur Unterstützung der regenerativen Prozesse bei Atrophie und Dystrophie der Vaginalschleimhaut. Fördert die Wundheilung nach

Geburten, nach gynäkologischen Eingriffen, bei Dystrophien in Folge einer Chemotherapie, ionisierender Bestrahlung, bei vaginaler Trockenheit, auch aufgrund von Östrogenmangel.

WANN VULNIPHAN NICHT ANGEWENDET WERDEN DARF

Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen einen der Bestandteile des Produkts sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

In diesem Fall ist ein Arzt zu befragen.

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Geräten und Maschinen


Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN PRODUKTEN

Obwohl keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt sind, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, bevor Sie VULNIPHAN Vaginalovula zusammen mit anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln zur vaginalen Anwendung benutzen.

ART DER ANWENDUNG

Ziehen Sie die beiden Laschen der Blisterverpackung auseinander und entnehmen Sie das Ovulum. Führen Sie es tief in die Scheide ein. Waschen Sie sich vor und nach dem Einführen des Ovulums die Hände.

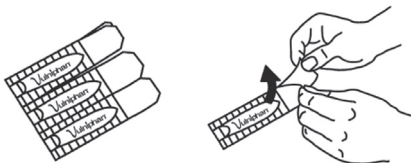

ZEITPUNKT UND DAUER DER ANWENDUNG

Wenden Sie ein Ovulum pro Tag an, vorzugsweise am Abend vor dem Zubettgehen oder wie von Ihrem Arzt verschrieben. Die Dauer der Anwendung hängt vom Verlauf der Beschwerden ab. Wenn nötig, können Sie VULNIPHAN Vaginalovula auch über einen längeren Zeitraum anwenden.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Die Anwendung von lokal verabreichten Produkten kann vor allem bei Gebrauch über einen längeren Zeitraum hin Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Unterbrechen Sie in diesem Fall die Behandlung und besprechen Sie mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise. Falls andere Nebenwirkungen auftreten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Augenkontakt vermeiden. Nicht schlucken.

HALTBARKEIT, AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Das Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in der unversehrten, ordnungsgemäß gelagerten Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nach dem Verfalldatum oder bei bereits geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht mehr. Bewahren Sie das Medizinprodukt geschützt vor Licht und Wärme auf, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 4°C und 25°C.

Medizinprodukte dürfen nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden; erkundigen Sie sich bei Ihrem Apotheker, wie nicht mehr verwendete Medizinprodukte zu entsorgen sind. Damit tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

MEDIZINPRODUKT

CE 0373

Hersteller:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dei Bersaglieri, 10 – 40010 Sala Bolognese (BO)
ITALIEN

Vertrieb: Dr. R. Pfleger GmbH, D-96045 Bamberg,
Telefon: 0951/6043-0, Telefax: 0951/604329.

E-Mail: info@dr-pfleger.de

250970

006

palde-203-20160519

DE 29 L REV 05 - 06/2016



Dr. Pfleger